

RS_DicomPro 取扱説明書


RS_DicomPro は RS_Dicom の進化版のプログラムです。

特徴はモダリティー、部位毎に選択して RS_Base に取り込む事が可能で、CD に MR、CT などまとめて多量の DICOM データが入っている場合などに有効です。

ご利用の場合は、RS_Base メーリングリストよりインストールをお願い致します。

1. 取込方法

1. CD を入れ、RS_DicomPro を起動します。※初回のみ、「管理者として実行」で起動してください。

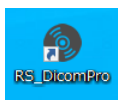


2. CD の入ったドライブを指定します。通常は、CD が入っていれば自動でドライブが指定されます。ドライブが違う場合は、プルダウンでドライブを指定してください。



3. 画像を読み込みます。

画像を一括で取り込む場合

1. ①「患者 ID」、「検査名」、「検査日」を入力します。
2. ②「一括取込」をクリックします。

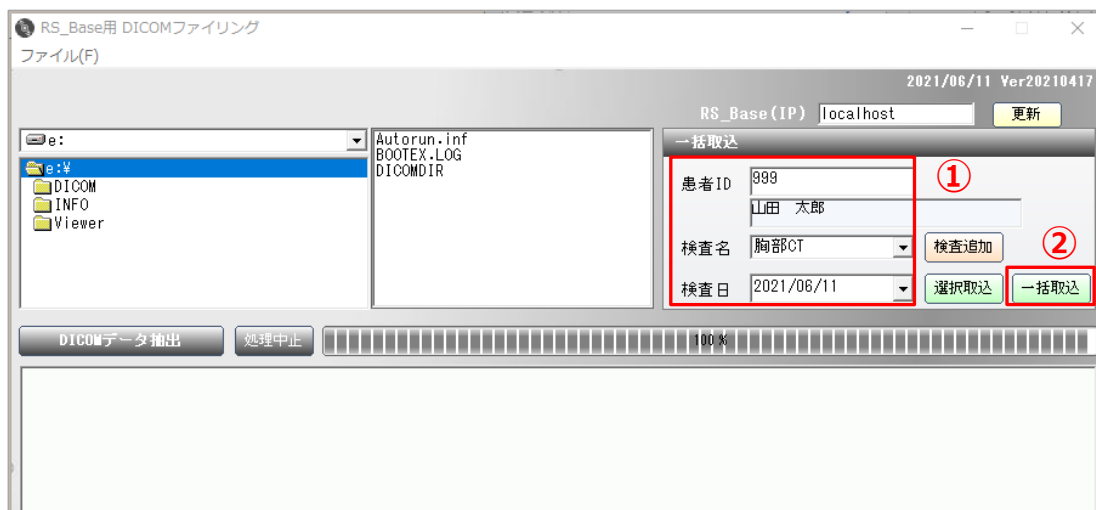


3. 「CD内のDICOMデータを一括取込します。」のメッセージが出たらOKをします。




4. 取込が完了したら、ソフトの左下に「作成完了しました。」と表示されます。

RS_Base で患者画面を開き、画像が登録されているか確認をしてください。

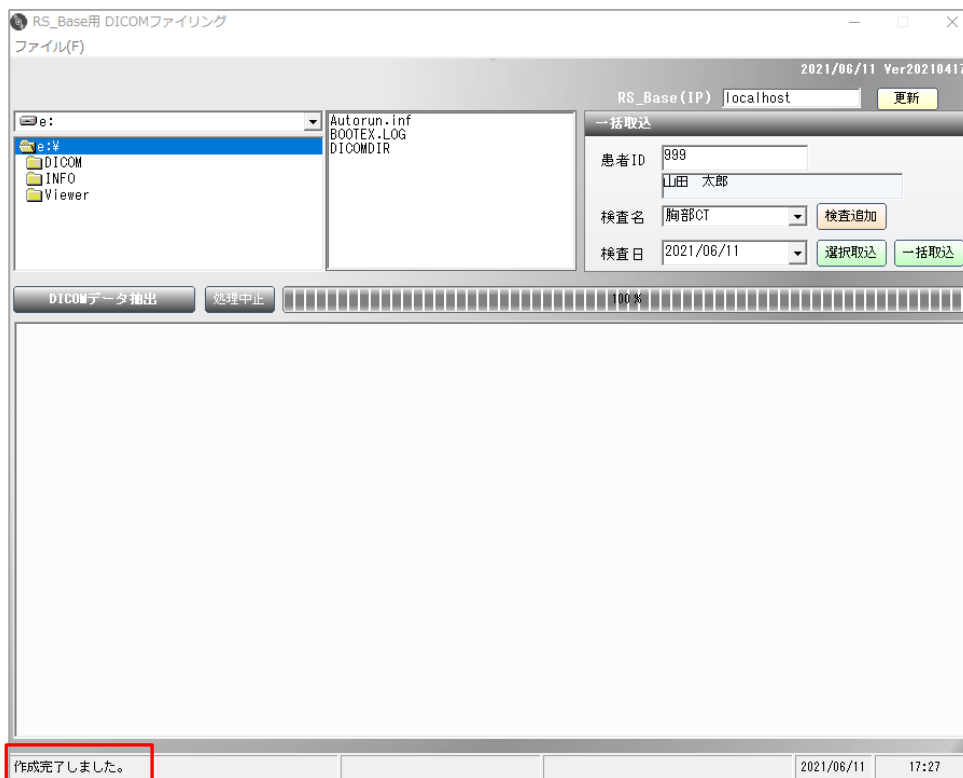


画像を選択して取り込む場合

1. ①「DICOM データ抽出」をクリックします。

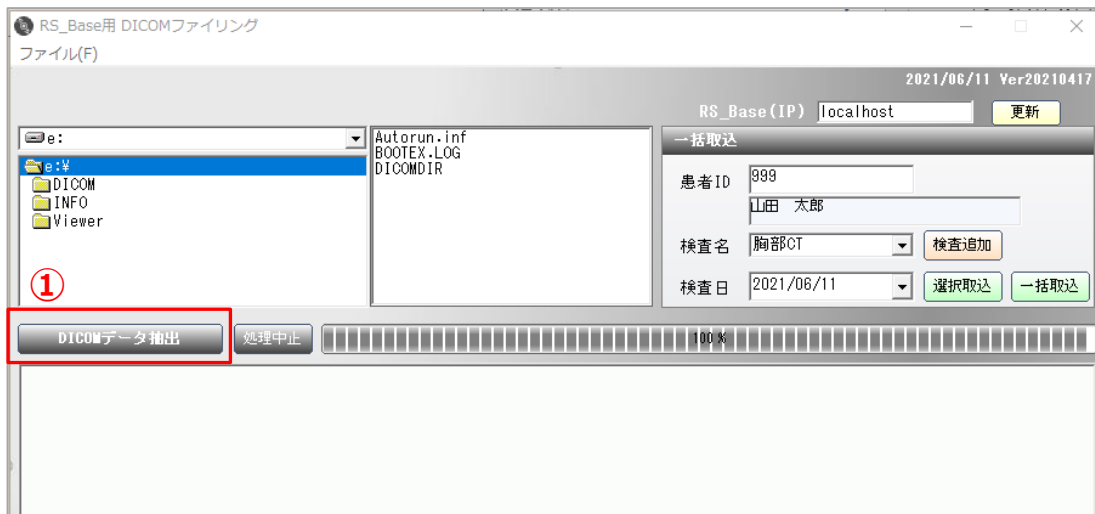

2. ②取込が完了すると、一覧が表示されます。

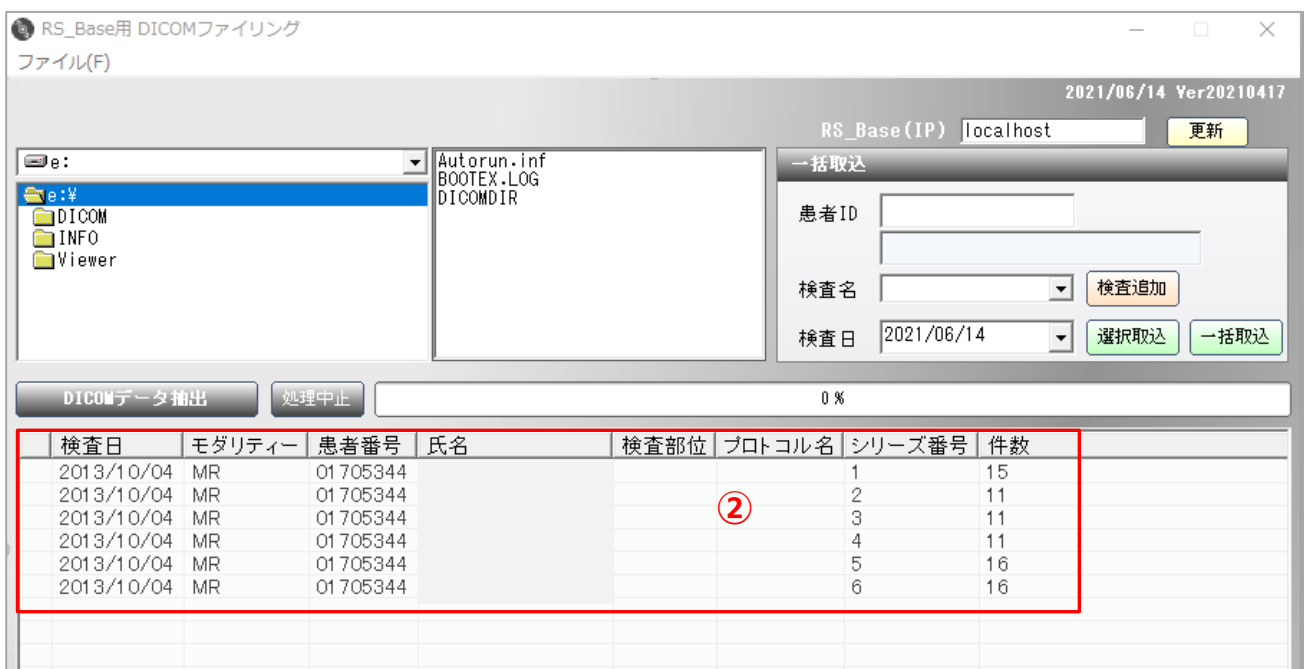

3. ③取り込みたい画像を選択します。

複数選択する場合は、SHIFT キーを押しながら選択、または CTRL キーを押しながら選択してください。

選択すると青く反転します。

The screenshot shows the same table as in the previous image, but with the first three rows highlighted in blue. A circled '3' is placed to the left of the first row.

検査日	モダリティ	患者番号	氏名	検査部位	プロトコル名	シリーズ番号	件数
2013/10/04	MR	01705344				1	15
2013/10/04	MR	01705344				2	11
2013/10/04	MR	01705344				3	11
2013/10/04	MR	01705344				4	11
2013/10/04	MR	01705344				5	16
2013/10/04	MR	01705344				6	16

※取り込みたい画像を確認したい場合は、明細をダブルクリックすると確認のための画像が表示されます。


(複数選択はできません)



検査日	モダリティ	患者番号	検査部位	プロトコル名	シリーズ番号	件数
2013/10/04	MR	01705344			1	15
2013/10/04	MR	01705344			2	11
2013/10/04	MR	01705344			3	11
2013/10/04	MR	01705344			4	11
2013/10/04	MR	01705344			5	16
2013/10/04	MR	01705344			6	16

選択が完了したら、④患者情報を入力します。

患者情報の入力完了したら、⑤選択取込を行います。

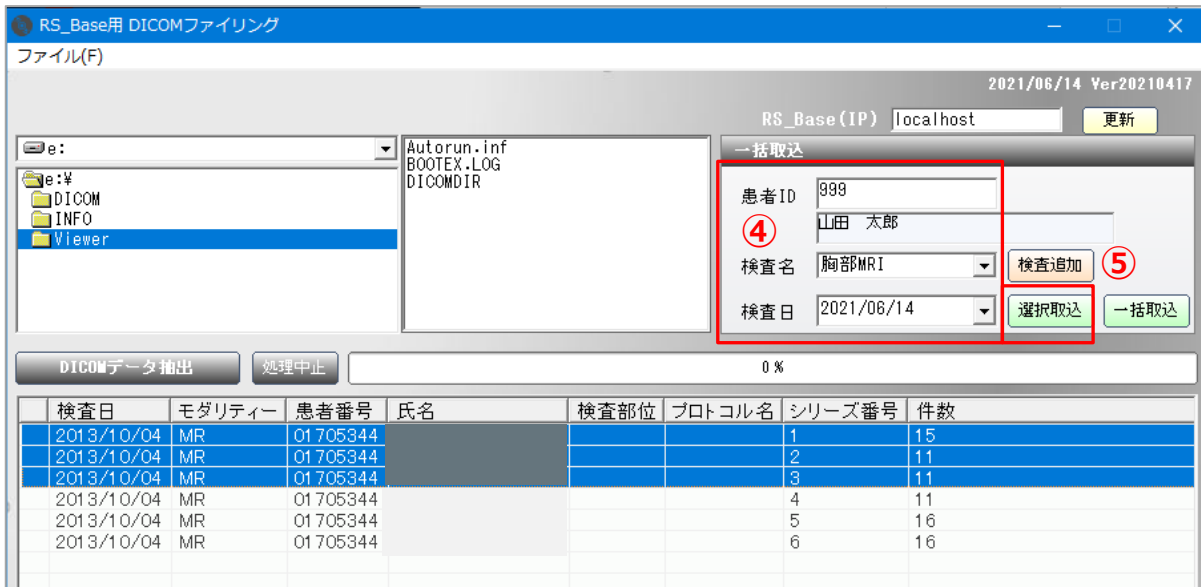

RS_Base用 DICOMファイリング

ファイル(F)

2021/06/14 Ver20210417

RS_Base (IP) localhost 更新

一括取込

患者ID 999

④ 氏名 山田 太郎


検査名 胸部MRI 検査追加 ⑤

検査日 2021/06/14 選択取込 一括取込

DICOMデータ抽出 処理中止 0%

検査日	モダリティ	患者番号	氏名	検査部位	プロトコル名	シリーズ番号	件数
2013/10/04	MR	01705344				1	15
2013/10/04	MR	01705344				2	11
2013/10/04	MR	01705344				3	11
2013/10/04	MR	01705344				4	11
2013/10/04	MR	01705344				5	16
2013/10/04	MR	01705344				6	16

取込が完了したら、取り込んだ画像の部分が「ファイリング済」と表示されます。

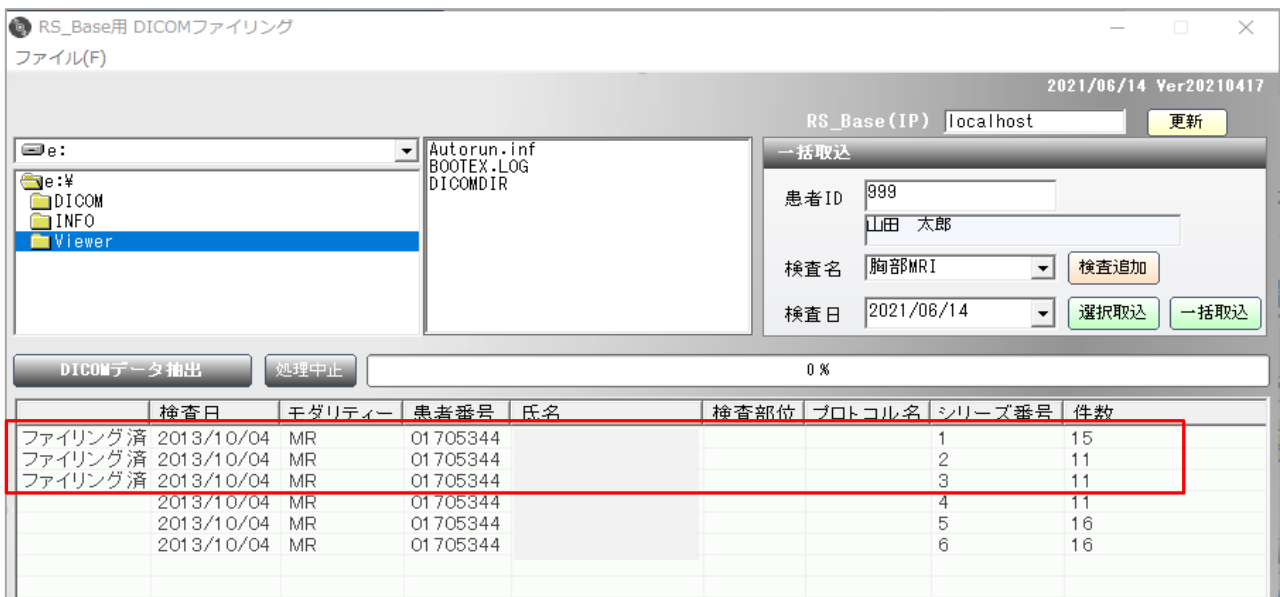

RS_Base用 DICOMファイリング

ファイル(F)

2021/06/14 Ver20210417

RS_Base (IP) localhost 更新

一括取込

患者ID 999

氏名 山田 太郎

検査名 胸部MRI 検査追加

検査日 2021/06/14 選択取込 一括取込

DICOMデータ抽出 処理中止 0%

	検査日	モダリティ	患者番号	氏名	検査部位	プロトコル名	シリーズ番号	件数
ファイリング済	2013/10/04	MR	01705344				1	15
ファイリング済	2013/10/04	MR	01705344				2	11
ファイリング済	2013/10/04	MR	01705344				3	11
	2013/10/04	MR	01705344				4	11
	2013/10/04	MR	01705344				5	16
	2013/10/04	MR	01705344				6	16

残りの画像を取り込む場合は、上記③～⑤の手順で取込をしてください。

※④患者情報はそのままお使い頂き、必要に応じて検査名を変更してください。


検査名を追加する場合

プルダウンにない検査名を追加する場合は、「検査追加」をクリックします。



メモ帳が開きますので、追加したい検査名を入力し、右上の×をクリックしてください。保存しますか？と聞いてくるので保存をしてください。

※ファイルタブの「上書き保存」でも保存ができます。

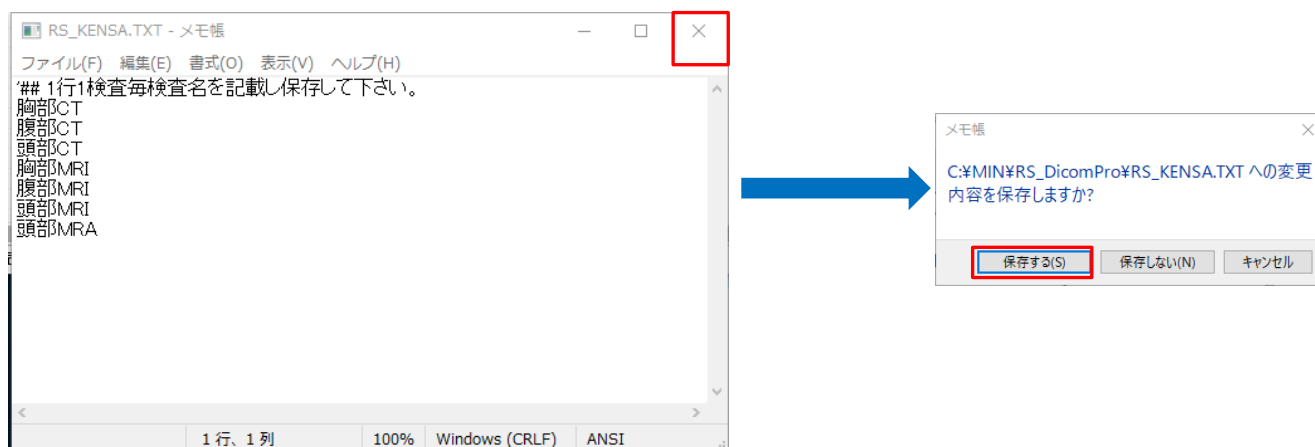

※検査追加した後に、検査名に表示されない場合は、一度、RS_DicomPro を開き直してください。