

○ 【RSViewer (Dicom Viewer) の特徴】

特徴1)

- ・ RSViewer は、RS_Base 専用の Dicom Viewer です。
- ・ CT、MRI などの表示や、CR の過去画像との比較などに優れた Dicom Viewer となっています。
- ・ CT や MRI がシリーズ別に表示されますので、それぞれにアクセスしやすいです。
また、スライスレベルが表示されます。

CR も、左右の領域で、過去画像がそれぞれ変わりますので比較する画像を選びやすいでしょう。

- ・ Jpeg 画像も表示可能で、内視鏡などの jpg のカラー画像はカラー調整が可能です。

特徴2)

クリニック & 有床診療所 60,000 円 + 消費税
病院 ご利用端末 10 台以下 250,000 円 + 消費税

☆同じ経営者でも、施設が異なる場合は、複数ライセンスが必要。

特徴3)

不定期に変更情報を公開してバージョンアップされますが、バージョンアップの機能が不要であれば、バージョンアップは必須ではなく、そのまま、ご利用可能です。

特徴4)

試用期間は 30 日ですが、継続使用をご希望される場合は、

医療機関様から、ライセンス申込 を FAX にて Medical-In に送っていただき、その後、折り返し ライセンスキー(認証キー)、および、請求書を FAX にて、送付させていただきます。(ライセンス申込の FAX 送付方法は、別メールで)


○ **【RSViewer の簡易取説】** は、下記にあります。

<http://rsbase.net/medical-in/RSViewer/RSViewer.pdf>

ただ、読んでも感覚的にわかりにくいことがありますので、Dicom の検査をクリックして RSViewer を表示して、当初必要と思われる、**下記を読んで使用**して、ご不明の点があればメールリストでご質問ください。

1) RSViewer の表示サイズの変更

希望のサイズにした後、画像の上で、右マウスクリックし、**表示位置保存**にて、表示位置、サイズが記憶されます。

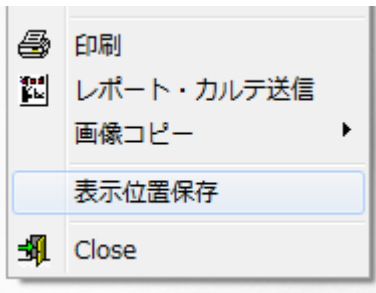

2) カスタム TAB

上部ボタンの User タグに、白黒反転、CTR、描画、などを配置しておりますが、この表示ボタンは、右マウスクリック、ボタンの設定、カスタム TAB にて、変更可能ですが、当面は現状でお使いください。



3) アクティブボタン




画像表示エリアの左右の角にマウスを持っていくと、各種機能ボタンの追加、変更が可能です。
初期値は、**左上が**、タグ表示の on off、ROI およびそのエリアの情報表示

右上が、メモ、画像選択、一般印刷、ペイント、ドロー、CTR 計測となります。

(印刷は画像選択ボタンをクリック後、画像をクリックして選択、画像を選択すると周囲がブルーになります。その後、印刷ボタンをクリックし、表示された画面で、フォーマットを選んでから、印刷します。)

右上のメモは、RS_Base のその日の所見内容が表示されますので、適当に表示サイズを変更してください。

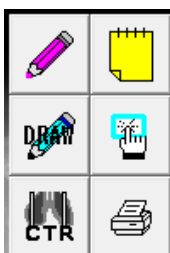

アクティブボタンの設定、変更は 右マウスクリック、ボタンの設定、 アクティブボタン にて可能です。




4) 分割表示

RSViewer の左上で、 2×1 を 2×2 にすると 4 分割などになります。



Viewer 下部に表示されている、CR の過去画像や CT、MRI などのサムネール画像を表示領域に drag & drop すると、そこに画像が表示されます。

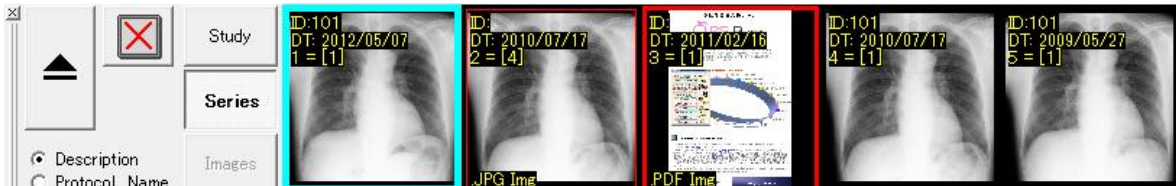

CR の場合、同名の過去画像がある場合は、マウスホイールにて過去の画像に順次切り替わります。

5) 連動表示

左上の \leftrightarrow が 3 つあるボタンで、CT、MRI などの表示中のシリーズ画像の連動、非連動が変わります。



一時的には、Shift Key にて、連動、非連動が変わります。

6) jpg 画像の立ち上げ

(118) 日付クリック時の jpg 立ち上げ を RSViewer の設定

(118) 日付クリック時のjpg立ち上げ :

により jpg 画像も日付クリックにて RSViewer で開きますので、内視鏡が暗めの画像だったりした場合、画質調整をして閲覧可能です。


また、Dicom の検査に、pdf や jpg の所見をファイリングしていても、それも RSViewer 表示されます。pdf は、ダブルクリックすると Acrobat が開きます。

【試用期間後、引き続き継続使用をご希望される場合】

- 1) 引き続き継続使用を希望される場合は、RSViewer 右上の登録手続き ボタンをクリックしますと RSViewer ライセンス情報 画面になります。(できるだけ、試用期間終了の一週間前までに、手続きをされることをおすすめします)



- 2) ライセンス情報画面で、利用者情報入力 ボタンをクリックして、

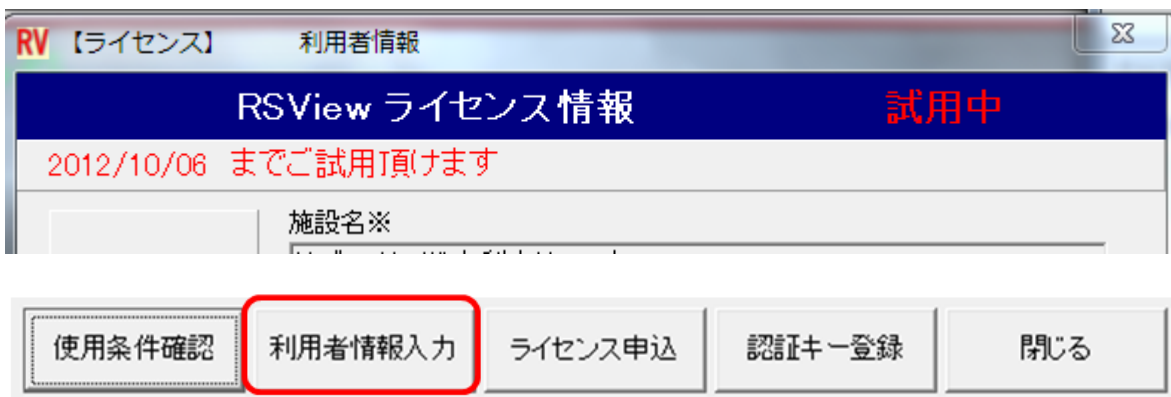

医療機関の情報入力しご利用形態を選択し、OK。

ライセンス

ご利用形態※

インストールキーは、ご病院ご利用端末10台以下等の情報により、生成される場合があります。

クリニク & 有床診療所

クリニク & 有床診療所

病院 ご利用端末10台以下

病院 ご利用端末11台以上

クリニク & 有床診療所 60,000円 + 消費税

病院 ご利用端末 10 台以下 250,000 + 消費税

注) 病院では、RSView 使用端末が 10 端末増加ごとに 25 万円となります。

注) 同じ経営者でも、施設が異なる場合は、複数ライセンスが必要です！！

3) 続いて、ライセンス申込 ボタンをクリックすると、

使用条件確認 利用者情報入力 **ライセンス申込** 認証キー登録 閉じる

入力した情報のファイルが表示されますので、印刷ボタンで印刷して、FAX で送信してください。(FAX 送信先は、印刷物に記載があります。)

(ライセンス申込用紙は、情報の再入力を行う場合に必要ですので、RS_Base にファイリングして、なくならないようにしておいてください。)

株式会社メディカルイン RSView ユーザ登録センター 宛

FAX: 082-982-2640

RSView 注文書兼 ライセンス認証キー発行依頼書

RSView は RSBase をご利用の医療機関または医療従事者のみご使用頂ける RSBase 専用の有償オプションプログラムです。

商品価格: ¥60,000- (税別)


印字日時	2012年09月07日	送信日時	
製品名	RSView	ご利用向け	ライセンス
インストールキー	EFB90485		
施設名	リバーサイド内科クリニック		
住所	〒 732-0964 広島県 広島市東区本島南1-7-6		
電話番号	082-212-3505	FAX 番号	082-227-5840
ご担当者	ヤマシタダシ		職種: 医師
E-Mail アドレス	gy@rsbase.net		
ユーザ登録/ライセンス認証キーの通知方法	FAX		
印刷物の送付について	送付を希望しない		

ご注意

- 本用紙をユーザ登録センターまでFAX送信して頂く事で、RSViewをお買い上げ頂けます。RSViewを正式稼働させるためには、ユーザ登録およびライセンス認証キー取得の手続きが必要となります。
- 印刷して、弊社が発送した印刷品に、ライセンス認証キーをご届出頂く、FAXまたはメールにてご通知申し上げます。
- ライセンス認証キーの発行は 同時にご請求書を送付いたしますので請求書宛の申込先に入会をお願ひ致します。
- FAX番号: 広島県広島市東区本島南1-7-6 082-227-5840

4) FAX 送信いただいた後は、当方から、**ライセンス認証キー**と、**ご請求書**を FAX にてお送りいたしますので、**RSViewer** 右上の登録手続きから **RSViewer** ライセンス情報の画面を表示し、**認証キー登録ボタン**をクリック、ライセンス認証キーを入力し、認証ボタンを押してください。

その後、一旦 **RSViewer** を閉じた後、再度立ち上げると、試用中のメッセージは消えています。

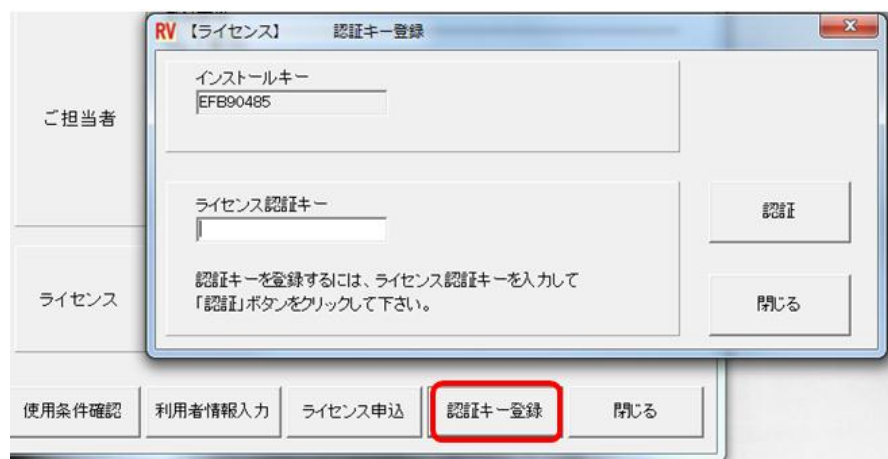

尚、送金は、2週間以内にお願いたします。

ライセンス申込み用紙と、FAX にて受け取った**ライセンス認証キー**は、**RS_Base** にファイリングするなどして、大切に保管しておいてください。